

OMNIRING


智能健康指環 使用說明書

產品說明


產品內容物

智能健康指環1只、充電座 2只、使用說明書1份。

產品示意圖

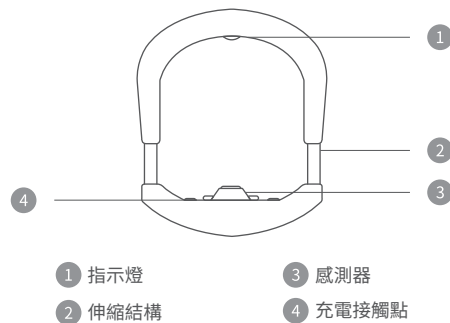


綠燈閃爍充電中

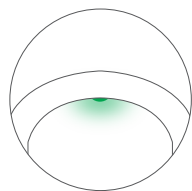

2. 將USB充電座接上電源進行充電，指環內側指示燈綠燈閃爍代表正在充電中。

綠燈恆亮充電完成
(充電時長為2小時)

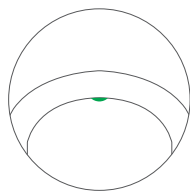

3. 指環內側指示燈綠燈恆亮，代表電量已充滿。(充電時間約2小時)

產品用途

本產品提供成人持續的血氧飽和度與脈搏監測，助您進行日常保健與生活健康管理。

警告

本產品僅為評估個人健康管理之輔助工具，不可用於診斷、治療、減輕或預防任何疾病。

注意事項

- 本儀器屬精密電子產品，請勿放置在濕氣過高或高溫的場所。
- 請將儀器與裝置遠離5歲以下兒童，避免誤食風險。
- 切勿在放有麻醉劑等易燃物品的環境下使用本儀器。
- 進行核磁共振 (MRI) 和電腦斷層 (CT) 檢查時，請勿同時使用本儀器。
- 使用本儀器時，請遠離會產生強電磁場的設備。
- 脫戴指環時，請抓住指環上半部再拉開伸縮結構，避免夾住皮膚。

二、下載APP

詳閱網站APP使用說明書後下載APP，並進行指環配對。




掃QR Code 詳閱說明書
官方網站：www.omniring.tw

使用步驟

一、指環充電

※首次使用需完成充電方能啟動指環。

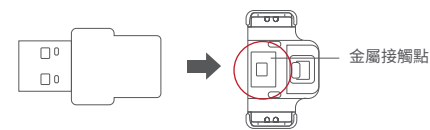


1. 拆開包裝，將磁吸式充電座對準並貼合指環內側金屬接觸點。


注意

充電前，請確保金屬接觸點乾燥無塵，避免造成零件接觸不良或損壞。

三、指環配戴

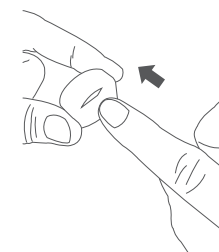


1. 選擇合適的手指、調整伸縮結構配戴指環，以舒適不易轉動為宜。

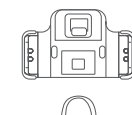


向前伸入

2. 將手指沿著箭頭方向伸入指環，注意感測器需位於手指下方位置。

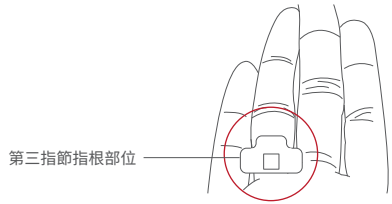

3. 請將指環戴在手指第三指節指根部位，此時感測器剛好在第三指節中間附近。

錯誤示範

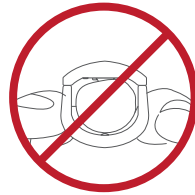


感測器在手指指背處



從箭頭的反方向伸入指環



指環太靠近手指上端

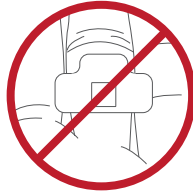

指環未靠近手指根部

影響檢測結果之因素

以下情形會影響判讀結果的準確性：

- 手指血液循環不佳
- 高頻環境干擾
- 嚴重血管收縮
- 嚴重貧血或使用壓脈帶
- 指環配戴過鬆或過緊
- 指環配戴皮膚狀況異常(脫皮或損傷)
- 刺青

產品與技術規格

產品規格

廠牌	Somnics
產品名稱	OmniRing 智能健康指環
型號	C11E
尺寸規格 (S/L)	水平內徑 18 / 20 mm 垂直內徑 15.6-21.6mm / 16.7-22.7mm 自動可調整 重量: 約為 10 g
材質	殼體: 醫療級316不鏽鋼; 表面處理: 高耐磨PVD鍍層
防水等級	IP65 (可短暫淋水, 不可穿戴洗手或浸泡於水中)
環境條件要求	操作環境: 5~40°C, 相對溼度15%~80% 儲存環境: 5~40°C, 相對溼度15%~80%
電源	內建3.7V鋰離子電池 輸入電壓5V直流; 輸入電流<=200mA
傳輸功能	藍芽無線傳輸4.1BLE (工作範圍<3m) 工作頻率 2.4-2.4835GHz 調變方式: GFSK 發射功率: -6dBm

監測模式

一般模式


可監測日常血氧與脈搏數據。使用一般模式時，務必確保手機APP與指環裝置順利連接，建議您在近距離範圍內使用。

睡眠模式

可持續記錄睡眠血氧與脈搏數據，並生成報告。

⚠ 注意

欲持續記錄血氧與脈搏，請務必在App上開啟「睡眠模式」，並於使用結束後切換為一般模式。

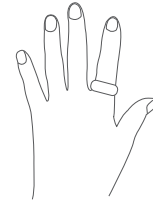

售後服務及保固聲明

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 本產品在正常使用而自然損壞故障之情況下，自購買日起算提供**一年保固期**。
- 為保障您的權益，使用本產品前請完整閱讀使用說明及注意事項，
- 若有任何疑問請參考 www.omniring.tw 或撥打客服專線：0809-099-623。

注意事項

保養與清潔

- 為避免裝置損壞，請勿撞擊或以尖銳物品清潔儀器。
- 建議使用絨布或棉棒沾取中性清潔劑輕輕擦拭，待儀器乾燥後再啟動。
- 請勿進行高溫、高壓消毒，且不得使用含有酒精之有機溶劑浸泡。
- 請勿自行拆開儀器，或使用功能測試機檢測本儀器。

電池與充電

- 若電池電量耗盡，請盡速充電避免電力耗損。
- 為維持電池效能，若長時間未使用儀器，請確保一個半月充電一次，避免電量耗盡。